


超音波コンタクトレンズ洗浄機

CE-3200

取扱説明書

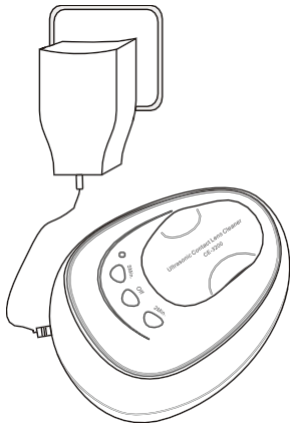

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

仕様：

名称	超音波コンタクトレンズ洗浄機	電源	AC100-240V 50/60Hz DC12V 1A
型番	CE-3200	消費電力	5W
外形寸法	98X72X48(mm)	通常洗浄	2分後に自動停止
タンク容量	4 ml	強力洗浄	5分後に自動停止
本体重量	91g (アダプター除く)	超音波周波数	46KHz

安全上のご注意

ご使用前に、以下の注意事項をよくお読みください。

 感電にご注意ください

1. 使用後は、すぐに電源プラグを抜いてください。

2. 入浴中は使用しないでください。

3. 水やその他の液体に落下しないよう、安全な場所に置いてください。

4. 本体を水やその他の液体に完全に浸さないでください。

5. 製品が水中に落ちた場合は触れず、すぐに電源プラグを抜いてください。

6. 電磁干渉を受けると、製品の電源が切れたり、電源が入らなくなったりする場合があります。その場合は、取扱説明書に従って機能を再設定してからご使用ください。

 注意：火災やけがの危険を避けてください

1. 取扱説明書に従って正しく使用してください。メーカーが推奨していない付属品は使用しないでください。

2. 破損したACアダプターは使用しないでください。製品が正常に動作しない場合、破損した場合、または水中に落下した場合は、指定のサービスセンターに連絡し、修理または交換を依頼してください。

3. 人がいない状態で電源を接続したままにしないでください。

4. 子供の手の届かない場所に置いてください。

5. 乾燥した平らな場所に置き、熱源や湿気を避けてください。

6. 就寝中は使用しないでください。


はじめに

従来のコンタクトレンズ洗浄では、コンタクトレンズをケア用品の洗浄液に浸し、レンズ表面に付着したタンパク質汚れを徐々に溶かして除去します。完全に洗浄するには通常6〜8時間かかります。


しかし、本製品は超音波技術を活用し、特殊な高周波（46KHz）を用いて2分で汚れやタンパク質の沈着を取り除き、細菌の繁殖を防ぎ、レンズを効果的に保護します。

洗浄効果の比較

17倍拡大画像

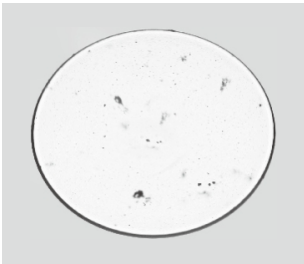

洗浄前

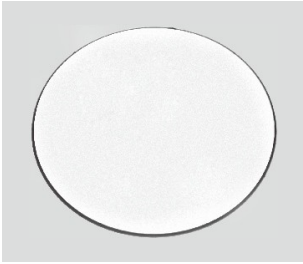

洗浄後

!

注意

レンズケア液、生理食塩水、または精製水以外の化学物質を注ぎ込まないでください。

タンクに水を入れすぎないでください。

水を入れずに本製品を作動させないでください。故障の原因となります。


交差感染を防ぐため、本製品はコンタクトレンズの洗浄にのみ使用し、他の物品の洗浄には使用しないでください。

故障や漏電の原因となるおそれがあるため、本体を水道水で洗い流さないでください。

本機が正常に動作しない場合は、使用を中止してください。専門家でない場合は、分解しないでください。

4

超音波コンタクトレンズ洗浄器および付属品

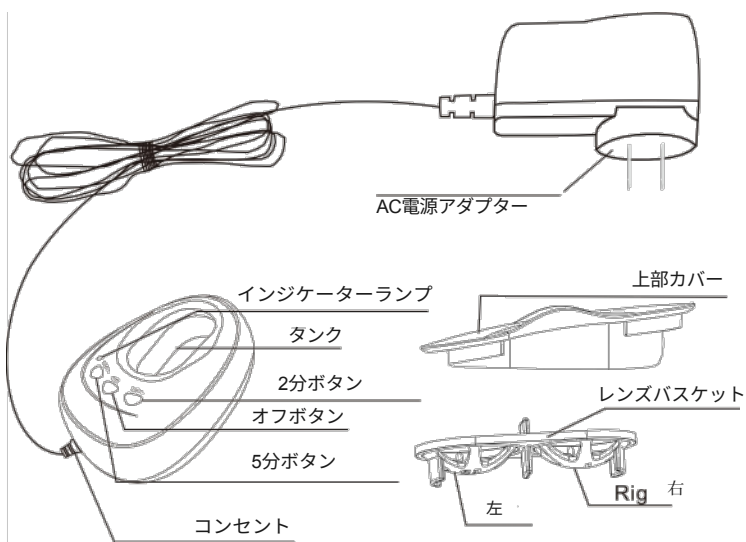


吸盤



ピンセット




空の溶液ケース

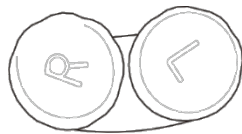


コンタクトレンズケース

取扱説明書

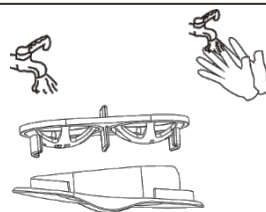

1. まず手を洗い、次にバスケット、タンク、上部カバーをぬるま湯または精製水で洗ってください。

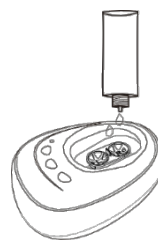


2. バスケットをタンクに入れ、レンズケア液
(または生理食塩水、精製水) をステンレス製
タンクの上端まで注ぎます。入れすぎないよう
にしてください。




3. ピンセットを使って、左のコンタクトレンズを「L」と記されたバスケットに入れます。右のコンタクトレンズについても同様にします。





4. カバーを閉じてください

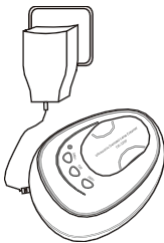 Indicator light on  2 Minutes cleaning	5. ACアダプターを本体に接続し、コンセントに差し込んでください。 6. 「2 Min.」ボタンを押してください。インジケータランプが点灯し、洗浄が始まります。2分間の洗浄が終了すると、本体は自動的に停止します。（洗浄終了） ⚠ 本体から「シュー」という音するのは、洗浄中に発生する正常な現象です。洗浄が行われていることを示しています。
---	--

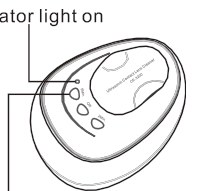強力洗浄の操作	
 Indicator light on 5 Minutes cleaning	⚠ 強力洗浄を行う場合は、「5 Min.」ボタンを押してください。インジケータランプが点灯し、強力洗浄が開始されます。5分後に本体は自動的に停止します。

⚠ コンタクトレンズや本体のタンクに触れる前に、手を洗ってください。

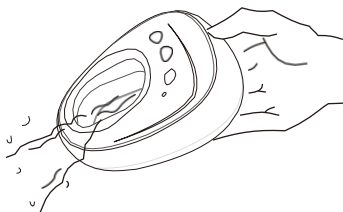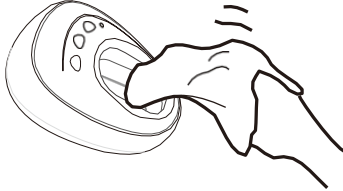メンテナンスノート	
  	1. 使用後は必ずすぐに電源プラグを抜いてください。 2. レンズバスケットとカバーを本体から取り外し、タンクの水を捨ててください。タンク内に水を残したままにしないでください。レンズバスケットとカバーは直接水ですすぐことができます。 ⚠ 破損や液漏れを防ぐため、本体全体を直接水で洗わないでください。 3. タンク、レンズバスケット、カバー、およびケース全体を、清潔な布またはガーゼで拭いてください。 4. レンズバスケットとカバーをクリーナーに戻してください。 5. 涼しく乾燥した場所に保管してください。 6. 修理やメンテナンスは、指定のメンテナンス拠点で行ってください。

連絡先
kashika.jp@gmail.com
URL:<https://www.kashika.jp/>