

歯科用Wi-Fi口腔内カメラ

CF-682

操作および設置マニュアル



目次

1. はじめに

3

1.1. 製品紹介

3

1.2. 標準構成

3

1.3. 特徴

3

2. 操作

4

2.1 口腔内カメラ

4

2.2 Wi-Fi機器の操作

4

3. インストール・操作

4

3.1 iOSシステム

4

3.2 Androidシステム

6

3.3 Microsoft製コンピュータ

9

4. トラブルの解決方法

11

5. お知らせ

12

1. はじめに

1.1. 製品のご紹介

当社のカメラは、最新の手持ち式口腔内カメラです。軽量の設計と滑らかな曲線により、持ち心地が良く、使いやすくなっています。カメラに内蔵された撮影ボタンで画像を撮影できるため、動画の撮影もワンステップで簡単に行えます。また、内蔵のLED光源により、信頼性が高く長寿命な照明を実現しています。

1.2. の標準構成

1. カメラ	1個
2.USBケーブル	1個
3. ディスク	1個
4. カメラ用スリーブ	50個


1.3. 特徴

- 1. 3.0メガピクセルの高解像度口腔内カメラ
- 2. 高解像度、高性能、オートフォーカス機能を搭載。
- 3. 6個の高輝度・長寿命白色LEDを内蔵
- 4. 内蔵のWi-Fi機能により、カメラの画像を携帯電話、タブレットPC、Windows搭載PCに同時に送信可能。
- 5. 前面の2つの操作ボタン：静止画撮影／保存、電源オン／オフ
- 6.内蔵リチウム電池により、フル充電で3時間以上使用可能。
- 7.無料アプリが付属しています。

2. 操作

2.1 口腔内 カメラ

前面

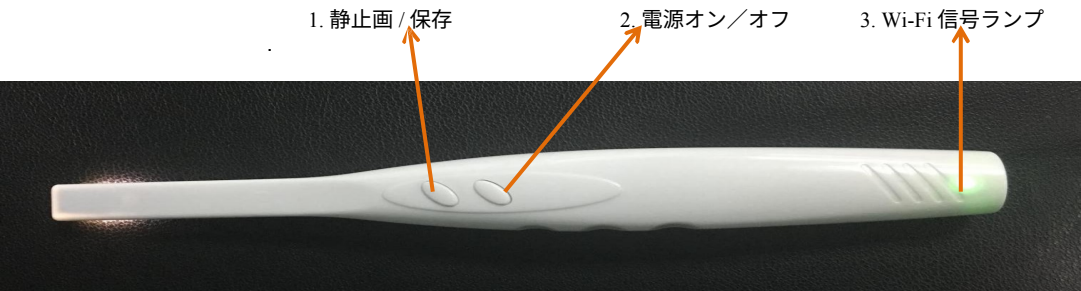

注：本機を使用する前に、バッテリーを完全に充電してください。Wi-Fiパスワード：88888888

1. オプション1（フリーズ／保存）を押すと、モニター上の画像がフリーズ表示され、さらに押すと、画像がソフトウェアに保存されます。

2. オプション2（電源オン／オフ）を押すと電源が入り、長押しすると電源が切れます
3. 2秒後にWi-Fi信号ランプが緑色に点灯し、8秒後にカメラのLEDライトが点灯します。

2.2. Wi-Fiデバイスの操作方法

1. 携帯電話、タブレットPC、およびコンピュータに「MLG」アプリをインストールしてください。
(3種類の無料ソフトウェアをご用意しています)

① (Androidシステム用)



② (Microsoft製パソコン用)



③ (iPhone用)



注：③ (iPhoneまたはiPadをご利用の場合)、App Storeに直接アクセスし、「MLG」と検索して、ソフトウェアをダウンロード・インストールしてください

2. インストール完了後、携帯電話には次のようなロゴが表示されます




注：1. バッテリーはフル充電の状態にしておいてください。

2. アプリを起動する際は、端末のWi-Fiが正常に接続されていることを確認してください。

3. インストール手順

3.1. iOS システム

1. 「電源オン/オフ」ボタンを長押しすると、2秒後に電源ランプが緑色に点灯し、8秒後にカメラのLEDが点灯します。（注：IPアドレスは工場出荷時に設定済みで、各端末には固有のIPコードが割り当てられています）

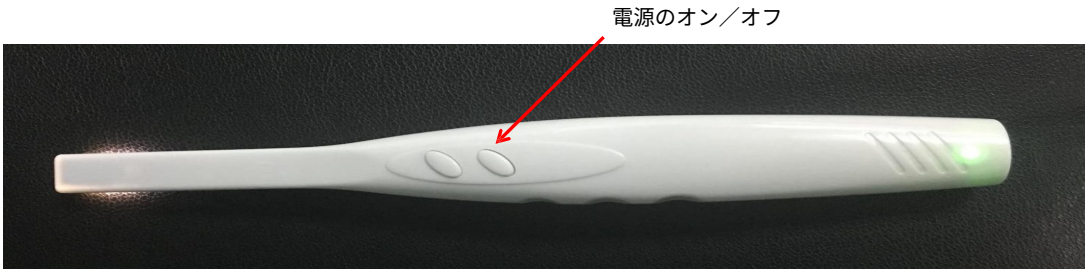


2. スマートフォンの「設定」をタップし、Wi-Fiを設定して、Wi-FiのIPアドレスとパスワード「88888888」を入力して接続してください。接続が完了すると、以下の画面が表示されます：



3. スマートフォンのメニューに戻り、「」をタップします。ポップアップ画面が表示されます：



4. 以下の「設定」をタップしてください：

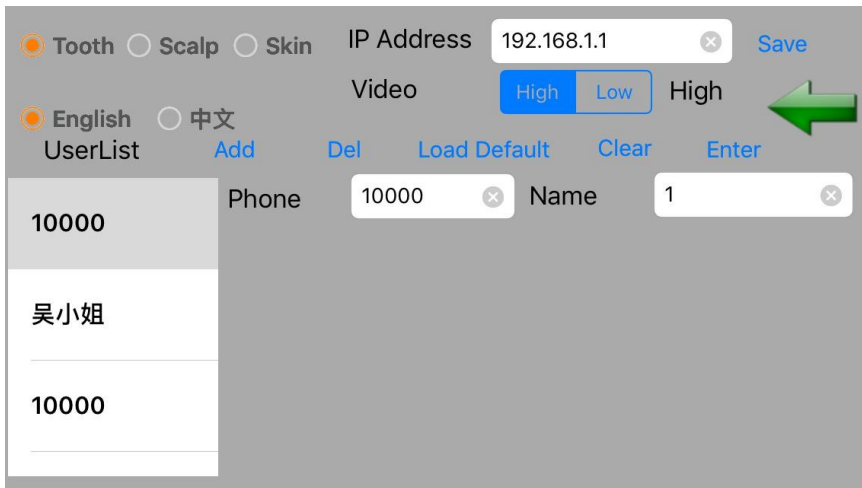


以下の設定に従ってください：

コンテンツ：tooth

言語：中国語と英語 動画：高


IPアドレスは常に「192.168.1.1」となります

5. 設定後、「保存」をクリックし、続いて「

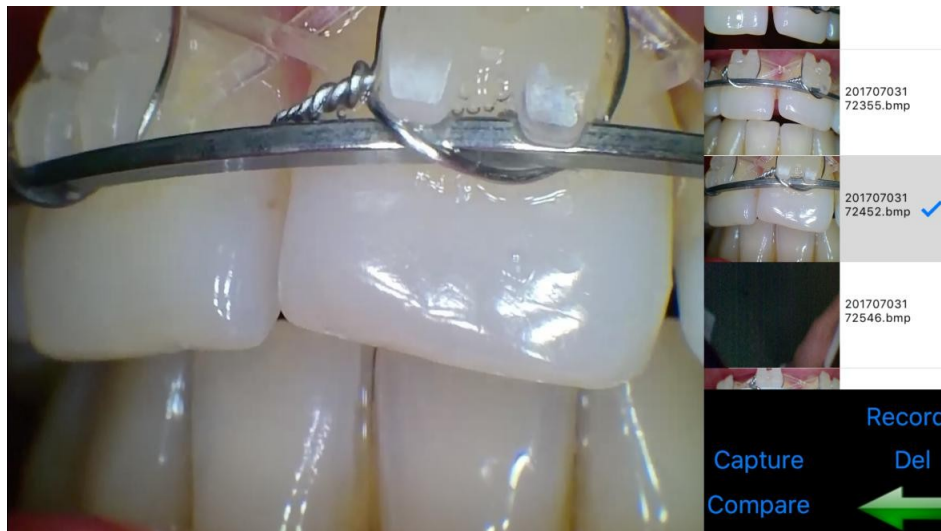

3.2. Androidシステム

1. 「電源オン/オフ」を長押しすると、2 秒後に電源ランプが緑色に点灯し、その後、カメラの LED ランプが点灯します（注：IP アドレスは工場出荷時に設定済みで、各機器には専用の IP コードが割り当てられています）。電源ボタン

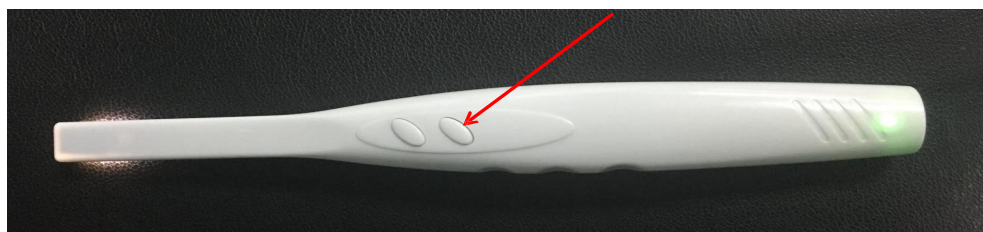

2. スマートフォンの「設定」をタップし、Wi-Fiを設定して、Wi-FiのIPアドレスとパスワード「88888888」を入力して接続します。接続が完了す

ると、以下の画面が表示されます：



3. スマートフォンのメニューに戻り、「」をタップします。ポップアップ画面で「tooth」を選択します。




4. 「登録」をタップして情報を設定します：




5. 「設定」をタップして言語（英語または中国語）を選択し、「保存」をタップします

(注：IPアドレスは常に192.168.1.1です)

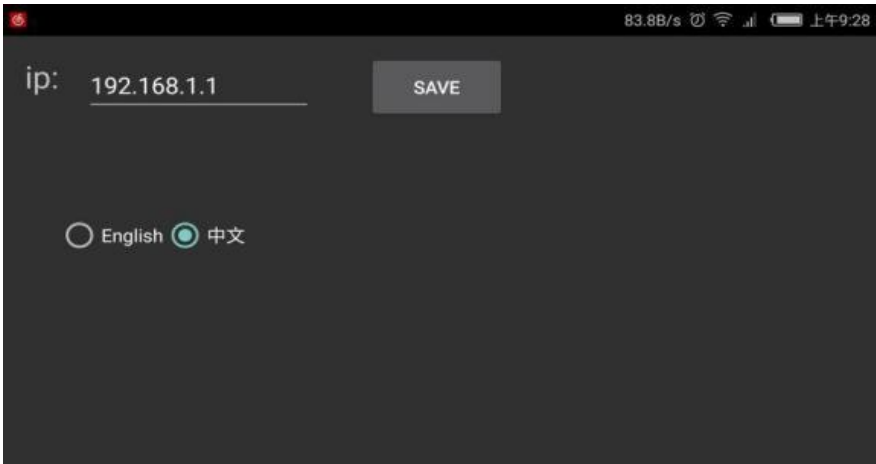

6. 「Enter」を押すと、ソフトウェアが起動します：

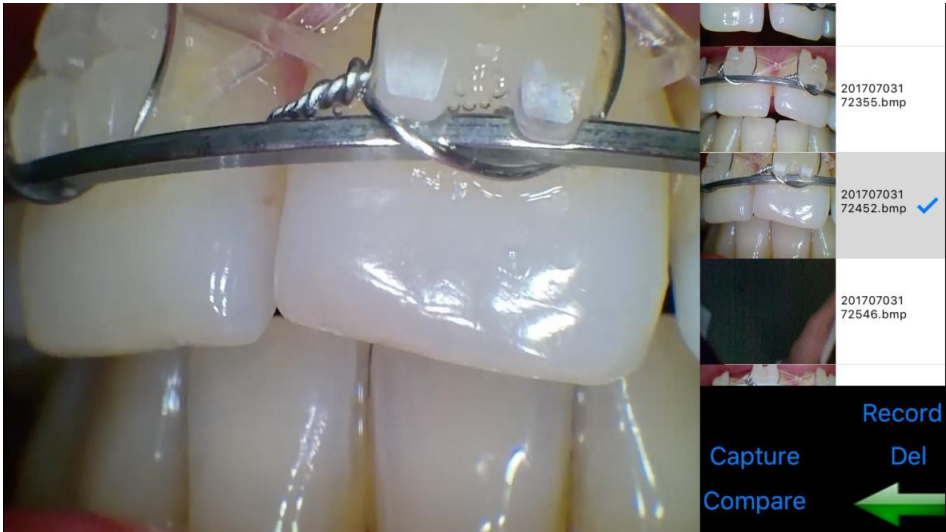

3.3. Microsoftコンピュータ

注：有線接続を解除し、Wi-Fiに接続する必要があります。

1. まず、フォルダを開いてください



2. 以下の画像のように、フォルダ内には3つのアプリケーションがあります。

(注：フォルダの外では、アプリケーションは動作しません)




3. アプリケーションをクリックすると、次のような画面が表示されます。



4. 簡単な病歴シートを作成できます。「追加」をクリックしてください。写真アルバムを追加し、「Enter」をクリックして入力してください。

5. 情報を編集し、「Enter」を押してソフトウェアに入力します：

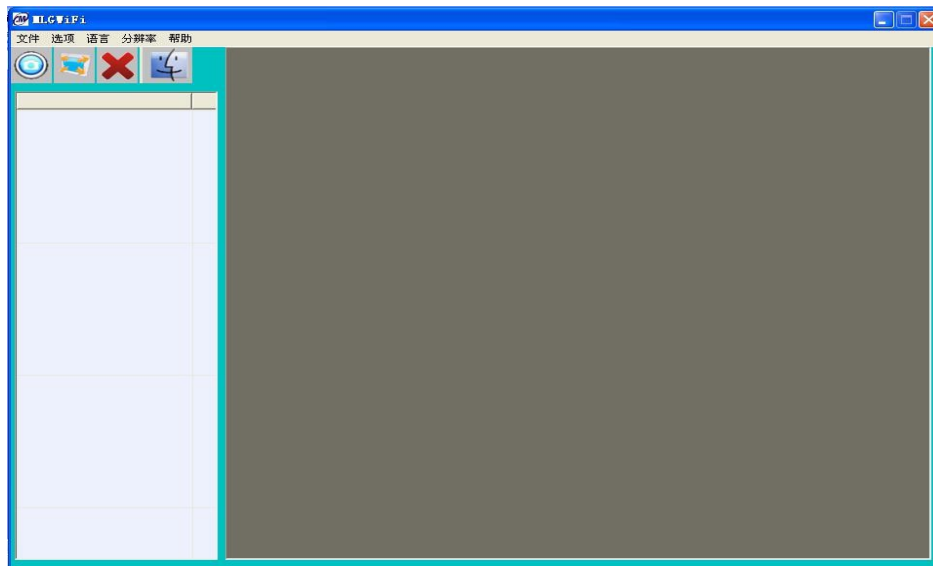


機能1  : キャプチャ

機能2  : 全画面表示

機能3  : 削除

機能4  : 比較

6. 設定：「USB ビデオデバイス」を選択すると、システムが起動します：

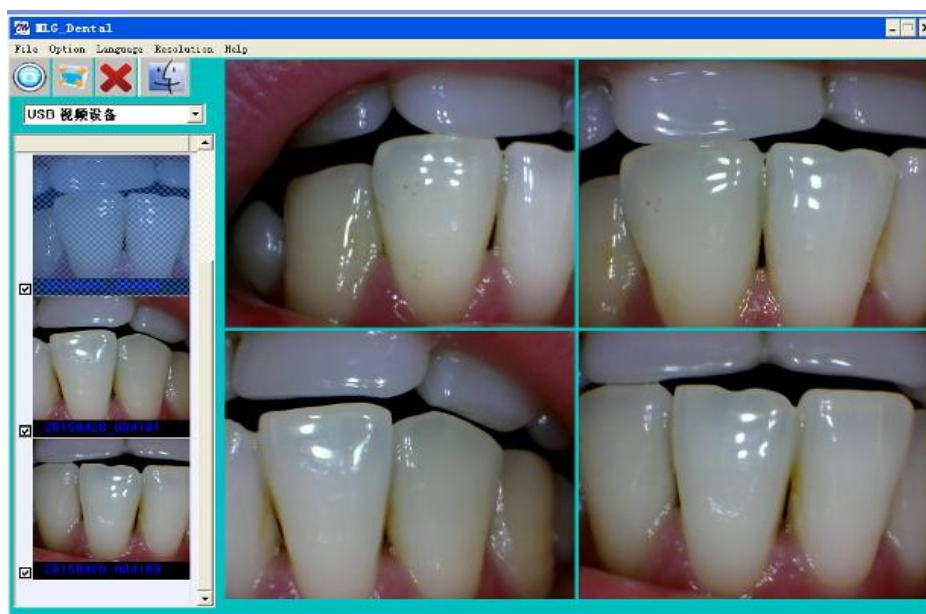

4. トラブルシューティング

製品に何らかの問題が発生した場合は、まず以下の特記事項をご確認ください。それでも解決しない場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

項目	不具合の状態	解決方法
1	電源スイッチ（ON/OFF）を操作しても製品が起動しない	1. 本体の充電状態を確認してください
2	パソコンやテレビに映像が表示されない	1. 製品とコンピュータまたはテレビ間の接続が正しいか確認してください 2. ドライバの設定が完了しているか確認してください 完了しているか確認し、
3	使用中は、画像が少しぼやけて見えることがあります	初めて使用する場合、これは自然な反応ですので、しばらくすると改善されます
4	画像が固まると、ディザリングが発生します	カメラで画像を撮影する際、手が震えることがありますが、製品の使用に慣れてくると、この現象は改善されます
5	パソコンやテレビの画面に斑点が見られる	1. 画面に斑点がないか確認してください 2. レンズに汚れがないか確認してください 3. 汚れが落ちない場合は、お近くの販売店にお問い合わせください

5. ご注意

ご使用のたびに、製品の外側に物理的な損傷や欠陥がないか確認してください。製品の表面は滑らかな仕上げになっており、欠けや損傷の痕跡があってはなりません。

警告および注意事項の理解

ユーザーは、作業員の安全を確保するためにあらゆる予防措置を講じ、本マニュアル全体に記載され、以下に要約されている警告

および注意事項を熟知しておく必要があります。**注意**：感電の危険を減らすため、制御モジュールや電源アダプタのカバーを取り外さないでください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。修理は、資格を持つ販売店のサービス担当者のみが行う必要があります。本システムの安全要件に準拠していない機器をスーパーカメラシステムに接続すると、スーパーカメラシステムの安全性が低下する恐れがあります。

清掃作業を行う前に、電源を切り、スーパーカメラシステムのコンポーネントの電源プラグを抜いてください。**警告**：火災や感電を防ぐため、本機器を雨や湿気にさらさないでください。

カメラハンドピースやコントロールモジュールに、洗浄液や消毒液を直接吹き付けしないでください。液体が内部回路に流れ込まないように注意してください。

ベンジンやシンナーなどを使用して表面を拭かないでください。表面仕上げが損なわれる恐れがあります。

連絡先
kdashika.jp@gmail.com
URL:<https://www.kdashika.jp/>